

Plasture calmant răcoritor, hidrogel

Bucurați-vă de confort și alinare de durată cu plasturii noștri răcoritori cu hidrogel! Combinația de mentol și hidrogel oferă o răcire eficientă, care ajută la ameliorarea durerilor de spate, articulații și mușchi. Reduce rigiditatea și tensiunea mușchilor și tendoanelor. Datorită materialului textil moale și adezivului delicat, plasturii sunt ușor de aplicat, se fixează bine pe piele și oferă eficiență maximă. Materialul confortabil permite purtarea discretă și plăcută pe tot parcursul zilei.

Mod de utilizare:

Curățați și uscați zona afectată, apoi aplicați plasturele pe zona dorită. Lăsați să acționeze până la 8 ore.

Aplicați întotdeauna un singur plasture, maximum 2 pe zi, pentru o perioadă de cel mult 7 zile.

Aplicațiile ulterioare pe aceeași zonă se recomandă după o pauză de 7–14 zile.

Copiii sub 12 ani pot utiliza plasturele doar sub supravegherea directă a unui adult.

Femeile însărcinate și cele care alăptează pot folosi plasturele numai după consultarea medicului.

Opriți utilizarea plasturelui și solicitați ajutor medical dacă:

- apar reacții cutanate precum erupții, mâncărimi, roșeață, iritație, durere, umflături sau bășici,
- starea se agravează sau simptomele persistă mai mult de 7 zile,
- simptomele dispar și reapar după câteva zile.

Nu utilizați plasturele:

- pe pielea rănită,
- împreună cu perne sau dispozitive de încălzire,
- în contact cu mucoasele, în special cu ochii,
- în caz de hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre ingrediente.

Compoziție: Apă purificată, Glicerină, Mentol, Hialuronat de sodiu, Glucozamină-condroitină, material textil nețesut, adeziv.

Numai pentru uz extern. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dispozitiv medical.

Depozitare: A nu se expune la lumina directă a soarelui, la îngheț sau la umiditate excesivă. A se păstra într-un loc uscat, la temperaturi de până la 25 °C.

Dimensiune plasture: 7 × 10 cm **Conținut pachet:** 2 plasturi

Producător: Zhengzhou Yupintang Medical Instrument Co., Ltd., No. 27, Fenglin Road, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, provincia Henan, China

Reprezentant european: Evertbiz GmbH, Landsberger Str. 155, 80687 München, Germania

Distribuitor pentru Cehia: F.group partner, s.r.o., Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Republica Cehă, e-mail: fgroup@fgroup.cz

Distribuitor pentru Slovacia: Fazzini group, a.s., Bulharská 42, 917 01 Trnava, Slovacia, e-mail: fazzini@fazzini.sk

Website: www.fortepatch.com

Certificat CE. Dispozitiv medical.