

Plasture răcoritor pentru ameliorarea durerilor de cap și a febrei

Aveți febră sau dureri de cap? Vă prezentăm plasturele care ajută eficient la ameliorarea durerilor de cap și a febrei atât la copii, cât și la adulți. Datorită compoziției sale inovatoare pe bază de hidrogel și efectului de răcorire, oferă o senzație plăcută și de durată, fără a fi necesară răcirea în frigider. Oferă o senzație imediată de ușurare, este delicat cu pielea și ușor de utilizat.

Folosiți-l în caz de dureri de cap, temperatură crescută, oboseală sau supraîncălzire a organismului. Plasturele nu este destinat tratării bolilor, ci doar ameliorării temporare a disconfortului. Poate fi utilizat și pentru răcorire în timpul zilelor călduroase sau după efort fizic. Fără miros și fără medicamente. Țineți-l mereu la îndemână!

Mod de utilizare: Curățați și uscați zona afectată. Îndepărtați folia de protecție și aplicați plasturele pe frunte sau pe partea din spate a gâtului. Evitați zona cu păr. Aplicați întotdeauna un singur plasture, maximum 2 plasturi pe zi, timp de cel mult 7 zile.

Copiii sub 12 ani pot folosi plasturele numai sub supravegherea directă a unui adult. Femeile însărcinate sau care alăptează pot folosi plasturele doar după consultarea medicului.

Opriți utilizarea plasturelui și solicitați asistență medicală dacă:

- apar reacții cutanate, cum ar fi erupții, mâncărimi, roșeață, iritație, durere, umflare sau bășici,
- starea se agravează sau simptomele persistă mai mult de 7 zile,
- simptomele dispar și reapar după câteva zile.

Atenționări:

- Nu aplicați pe pielea rănită.
- Nu utilizați împreună cu o pernă electrică de încălzire.
- Evitați contactul cu mucoasele, în special cu ochii.
- Nu utilizați în caz de hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre ingrediente.

Compoziție: Mentha, Glicerină, Apă purificată, Emulsie CMC, material textil nețesut, adeziv.

Numai pentru uz extern. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dispozitiv medical.

Depozitare: A nu se expune la lumina directă a soarelui, la îngheț sau la umiditate excesivă. A se păstra într-un loc uscat, la temperaturi de până la 25 °C.

Dimensiune: 5 × 12 cm **Conținutul ambalajului:** 1 plasture

Producător: Zhengzhou Yupintang Medical Instrument Co., Ltd., No. 27, Fenglin Road, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, provincia Henan, China

Reprezentant european: Evertbiz GmbH, Landsberger Str. 155, 80687 München, Germania

Distribuitor pentru Republica Cehă: F.group partner, s.r.o., Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Republica Cehă, e-mail: fgroup@fgroup.cz

Distribuitor pentru Slovacia: Fazzini group, a.s., Bulharská 42, 917 01 Trnava, Slovacia, e-mail: fazzini@fazzini.sk

Site: www.fortepatch.com

Certificat CE. Dispozitiv medical.